




Procédure de reconnaissance du clavier lorsqu'il ne répond plus

1.	Vérifier que la touche « Lock to Clean » soit désactivée :	<p>Touche désactivée : clavier utilisable</p>  <p>Touche activée : clavier inutilisable</p> 
2.	<p>Si la touche est activée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivez la touche, • Le clavier est maintenant utilisable. <p>Si la touche est désactivée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrez l'armoire à pharmacie sécurisée (APS) en suivant les points 3-10. 	
3.	Dégager l'APS de son emplacement afin d'avoir accès au bouton d'alimentation marche/arrêt (I/O) situé à l'arrière	
4.	Éteindre l'APS à l'aide de l'interrupteur O/I.	
6.	Attendre que l'APS s'éteigne (l'écran est maintenant noir).	
6.	Déconnecter le câble d'alimentation.	
7.	Attendre 2 minutes.	
8.	Reconnecter le câble d'alimentation.	
9.	Rallumer l'APS à l'aide de l'interrupteur O/I.	
10.	Laisser l'APS effectuer l'ensemble des mises à jour logicielles.	



Dans le cas où cette manipulation ne fonctionne pas, contactez dans l'ordre :

- Votre assistant.e en pharmacie d'unité de soins,
- La Hotline BD Suisse au +41 61 563 13 20.