

Procédure en cas « d'écran bleu qui ne répond pas »



1.	Il arrive que l'armoire à pharmacie sécurisée (APS) se bloque pour une raison informatique.	
2.	Dégager l'APS de son emplacement afin d'avoir accès au bouton d'alimentation marche/arrêt (I/O) situé à l'arrière	
3.	Éteindre l'APS à l'aide de l'interrupteur O/I.	
4.	Attendre que l'APS s'éteigne (l'écran est maintenant noir).	
5.	Déconnecter le câble d'alimentation.	
6.	Attendre 10 minutes.	
7.	Reconnecter le câble d'alimentation.	
8.	Rallumer l'APS à l'aide de l'interrupteur O/I.	
9.	Laisser l'APS effectuer l'ensemble des mises à jour logicielles.	
10.	L'APS est maintenant prête à être utilisée.	

Dans le cas où cette manipulation ne fonctionne pas, contactez dans l'ordre :



- Votre assistant.e en pharmacie d'unité de soins,
- La Hotline BD Suisse au +41 61 563 13 20.