

Procédure en cas de statut hors connexion



1.	Dégager l'armoire à pharmacie sécurisée (APS) de son emplacement afin d'avoir accès au bouton d'alimentation marche/arrêt (I/O) situé à l'arrière.	
2.	Sélectionner Maintenance situé dans le menu « Plus » de la barre inférieure de l'écran.	
3.	Tenez-vous prêt à appuyer sur le bouton d'alimentation marche/arrêt (I/O).	4. Appuyer sur l'icône
5.	Lorsque l'écran devient noir : • Éteindre l'APS à l'aide du bouton d'alimentation I/O.	
6.	Déconnecter le câble d'alimentation.	7. Attendre 10 minutes.
8.	Reconnecter le câble d'alimentation.	9. Rallumer l'APS à l'aide de l'interrupteur O/I.
10.	Laisser l'APS effectuer l'ensemble des mises à jours logicielles.	



Dans le cas où les manipulations ci-dessus n'auraient pas fonctionné :

- Contacter l'APUS du lun. au ven. de 08h à 17h ou,
- La Hotline BD au +41 61 563 13 20.